

## Epi proColon 2.0 CE kolonoskopi muadilidir?

**Hayır.** Epi proColon 2.0 CE kan testi, kolorektal kanserin erken tespitinde ilk adım olarak diğer invaziv olmayan tarama testlerine (örneğin FOBT) göre daha uygun ve kaliteli bir alternatif sunmaktadır.

## Epi proColon 2.0 CE'nin avantajları nedir?

Kolorektal kanser taraması yaptırmak çok önemlidir. Erken tespitinde, tedavi olasılığı daha yüksektir. Tarama yaptırmamış iseniz, kolonoskopi veya dışkı testleriyle taramaya soğuk bakıyorsanız, Epi proColon 2.0 CE, kolay ve rahat genetik bir kan testi olarak size uygundur. Test için kan alınmadan önce ilaç veya özel bir beslenme rejimine, herhangi bir ön test yapılmasına, bağırsak hazırlığına veya dışkı toplamaya ihtiyaç yoktur. Kanınız herhangi bir zaman diliminde alınabilmektedir



### Daha Fazla Bilgi

Daha fazla **Epi proColon 2.0 CE** hakkında bilgi için lütfen [epiprocolon.com/en/patients](http://epiprocolon.com/en/patients) sayfasını ziyaret ediniz. Burada aklınıza gelen sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz. Doğrudan bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.


epigenomics

Epigenomics, AG  
Email: [Support@products.epigenomics.com](mailto:Support@products.epigenomics.com)  
On-line: [epigenomics.com](http://epigenomics.com)  
Phone: +49 30 24345 222  
Corporate Phone: +49 30 24345 0 Fax: +49 30 24345 555

Epi proColon® is a registered trademarks of Epigenomics AG, in Europe, USA and/or other selected countries. All other trademarks, brands, and names contained herein are the property of their respective owners.

MKT0003 Rev3 ©2016 Epigenomics AG, Germany

HASTA BİLGİLENDİRME

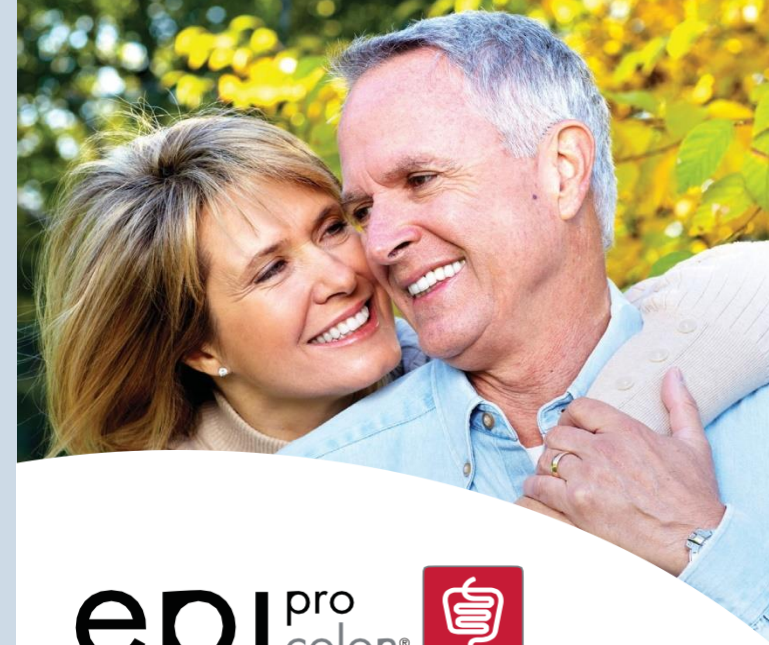

Epi proColon® 2.0 CE  
Kolorektal kanser  
taramasına yönelik  
genetik bir kan  
testidir.

epigenomics

# Niçin kolorektal kanser taraması önemlidir?

Her yıl tüm dünyada kolorektal kanserden yaklaşık bir buçuk milyon insan ölmektedir. Bununla birlikte Kolorektal Kanseri erken teşhis edildiğinde en iyi tedavi edilebilen kanserlerden biri.

Bu açıdan, tüm uluslararası sağlık örgütleri özellikle


50 yaş üstü düzenli

Kolorektal kanser

taraması yapılması

gerekliğini

belirtmektedir.

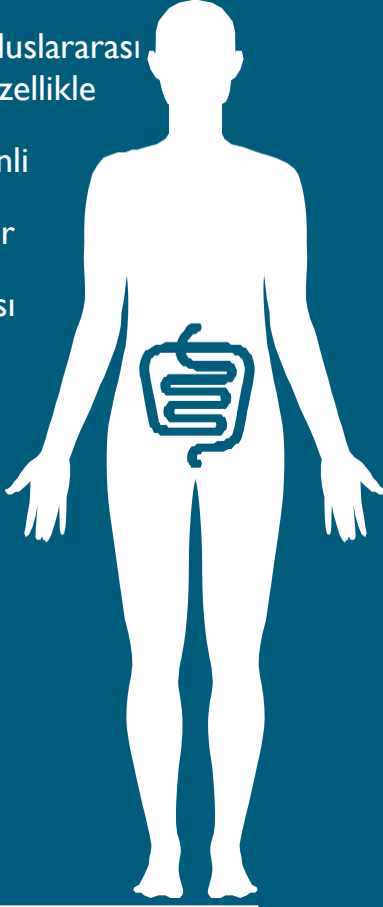

## Kolorektal Kanserin erken tespitinde önerilen yöntemler nelerdir?

Tarama yöntemleri birçok ülkede mevcuttur. Genellikle yıllık tarama amacıyla hastaların dışkılarında gizli kan arama veya kolonoskopisi yaptırılmaları önerilir.

Kolonoskopi ve dışkı testlerinin kolorektal kanserle mücadelede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu yöntemlerin kabullenilmesindeki sıkıntı nedeniyle, Epi proColon 2.0 CE kan testi, kolorektal kanser taramasında dikkate alınması gereken basit ve kabul edilebilir bir alternatif sunmaktadır.

## Epi proColon 2.0 CE testi nedir?

Epi proColon 2.0 CE, kolorektal kanserin erken tespitinde ilk adım olarak uygulanabilen rutin ve kullanışlı genetik kan testidir. Test, kolorektal kanserle ilişkili olan değişime uğramış Septin 9 DNA'sını algılar. Bu test için kan alınmadan önce diyet veya ilaç kullanımı veya değişikliği gerekmez. Uzman kişinin kan örneğini analiz için bir yetkili laboratuvara göndermesi yeterlidir. Yaklaşık bir hafta sonra doktorunuz test sonuçlarınızı alarak sizinle durum değerlendirmesi yapacaktır.

## Epi proColon 2.0 CE nasıl çalışır?

Kolorektal tümörler kanserin ilk evrelerinde bile, bir tür DNA olan Septin 9 hücrelerini kan dolaşımına salarlar. Septin 9, kolorektal kanser tümörü hücrelerinde normal hücrelerden daha farklı değişime uğrar. Kan örneği içerisinde değişime uğramış DNA, Epi proColon 2.0 CE testiyle tespit edilebilir. Değişime uğramış Septin 9 DNA'sı genellikle kolorektal kanserli kişilerin kan örneklerinde bulunur.

n



## Eğer test sonucu negatif ise kanser olmadıysam ne kadar emin olabilirim?

Test sonucunuz negatif ise, değişime uğramış Septin 9 DNA'sının kan örneğinizde bulunmadığı anlamına gelir. Araştırmalar, olumsuz sonuçlanan bir kişinin kolorektal kanseri taşıması ihtimalini % 99,9 oranında göstermiştir. Ancak yanlış negatif sonuçlar elde etmek mümkündür ve bu nedenle kolorektal kanser taramasına düzenli olarak devam edilmelidir.

## Eğer Septin 9 test sonucu pozitif ise kolorektal kanseri var mı demektir?

Kan numunenizde değişime uğramış Septin 9 DNA'sı saptanırsa, kolorektal kanser olma şansınız artmış demektir, ancak kanserin olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, yanlış-pozitif sonuçlar mümkündür ve bu nedenle, doktorunuz kolorektal kanseri olup olmadığını öğrenmek için kolonoskopi yaptırmanızı önerebilir.